

Inmovilización segura
- edades 3 meses
hasta adolescentes
y adultos



Usado en miles de
Clínicas, hospitales y
consultorios dentales

Para inmovilizar
pacientes alterados



Las tablas **Olympic Papoose Boards** son ayuda indispensable

Rápido y fácil de aplicar

- Tres juegos de solapas de lona opuestas con sujetadores Velcro® dobladas sobre el cuerpo del paciente
- La forma diagonal de cada tabla hace que las solapas se entrecrucen, proporcionando un ajuste abrigado y cómodo

Fácil de limpiar

- Sencillamente limpie la tabla con desinfectante líquido o jabón y agua
- Los juegos de solapas y las correas se desmontan a máquina

Coloque al niño en la tabla Papoose Board y asegure los brazos con las correas para brazo ajustables de Velcro. Las correas se deslizan hacia arriba o hacia abajo para acomodar la longitud del brazo.



Cierre las solapas abdominales. Un área generosa de Velcro en las solapas proporciona inmovilización cómoda y positiva. El paciente está firmemente controlado.



Ahora cierre las solapas de las piernas. La forma diagonal de la tabla hace que las solapas se entrecrucen y se ajusten de manera abrigada y cómoda. Se desaniman a forcejear.



Finalmente, sujete las solapas del hombro y la correa de la cabeza. Si así lo desea, los brazos se pueden extender a través de las aberturas en las solapas del hombro.



Se cuelga en la pared
Para almacenamiento compacto.

Ajuste infinito
Áreas generosas de Velcro en las solapas.

Solapas desprendibles
Se limpian fácilmente.

Tabla Rígida
Peso ligero, durable. Se limpia con trapo húmedo.



Se utiliza en miles de hospitales y en consultorios médicos y dentales

Se limpia con un trapo húmedo con agua.
Las solapas de brazo se pueden lavar.

Inmovilización selectiva que permite la exposición mientras mantiene el control

- Cualquiera de los pares de solapas puede abrirse mientras el niño sigue sujeto firmemente por las solapas restantes y/o las correas de cabeza y brazo




Correa de Cabeza
Se ajusta hacia arriba o hacia abajo. Acojinada con espuma.

Orificios para Brazos
Permite la exposición de uno o ambos brazos.


Correas para Brazos
Con cierre de inmovilización Velcro. Se ajusta hacia arriba y hacia abajo.

Forma Diagonal
Hace que las solapas se amolden a la forma del cuerpo.

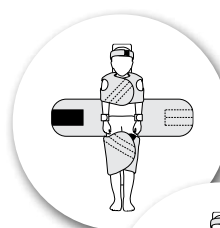


Abdomen Expuesto

Solapas de pecho y piernas cerradas. Los brazos y la cabeza están sujetos por las correas.

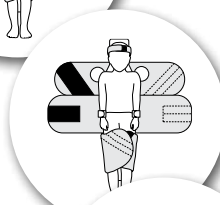


Cuerpo Superior Expuesto

Solapas de piernas cerradas. Los brazos están inmovilizados por correas para brazos de Velcro.

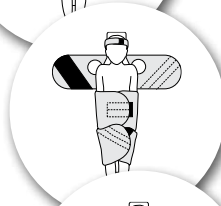


Pecho Expuesto

Solapas abdominales y piernas cerradas para sujetar firmemente al paciente.

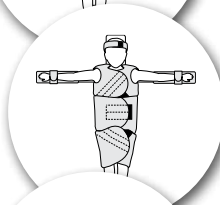


Brazos Expuestos

A través de la abertura en las solapas del pecho. Pueden sujetarse sobre el inmovilizador de brazos (opcional).

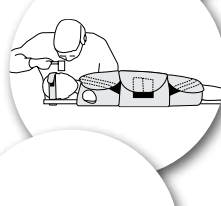


Correa de Cabeza

Velcro Ajustable. Puede moverse hacia arriba o hacia abajo. (Inmovilizador de cabeza opcional disponible).

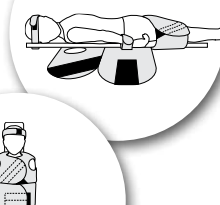


Posición Prono (boca abajo)

Solapas de piernas cerradas. Brazos sujetos por correas. Cabeza asegurada con la correa de cabeza.

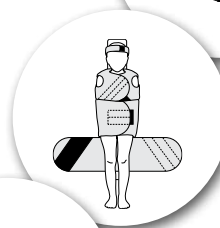

Piernas Expuestas

Solapas de pecho y abdominales cerradas para inmovilización del cuerpo.

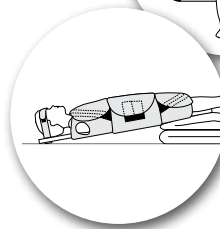

Colocación en Postura de Trendelenburg
o Trendelenburg Inverso.

Accesorios de la Olympic Papoose Board

Inmovilizador de cabeza:

Inmovilización completa de cabeza. Se sujeta rápidamente a la tabla. Correas Velcro ajustables. Almohadillas de espuma para comodidad. Cuando la ordene, especifique el tamaño de la tabla Papoose Board.



Extensiones de las solapas:

Para inmovilizar niños más grandes. Dos correas amplias, con ajuste Velcro, se unen a las solapas de pecho y abdominales de la tabla Papoose Board de Tamaño Regular. Permite un rango más amplio de ajuste.



Inmovilizador de brazos:

Para tablas Papoose Board de Tamaño Chico y Regular. Se desliza debajo de la tabla para asegurar firmemente los brazos. Las correas para brazos de Velcro se ajustan de manera lateral.



Todos los Papoose Boards son libre de latex.
Los Papoose Boards de Olympic estan totalmente garantizados por doce meses.

Información para realizar pedidos

Olympic Papoose Boards

Tamaño Chico Para infantes de hasta 24 meses
Incluye correas de cabeza y brazos
CAT. NO. 50510

Tamaño Regular Para niños de 2 a 6 años de edad
Incluye correas de cabeza y brazos
CAT. NO. 50500

Tamaño Grande Para niños de 6 a 12 años de edad
Incluye correas de cabeza y brazos
CAT. NO. 53600

Tamaño Extra Grande Para adolescentes y adultos
Incluye correas de cabeza y brazos
CAT. NO. 54610

Inmovilizadores De Cabeza

Para Tabla Papoose Board Tamaño Chico
CAT. NO. 50518

Para Tabla Papoose Board Tamaño Regular
CAT. NO. 50508

Para Tabla Papoose Board Tamaño Grande
CAT. NO. 53608

Otros Accesorios

Inmovilizadores de Brazos
Para Tablas Papoose Boards Tamaño Regular y Chico
CAT. NO. 50509

Extensiones de Solapa
Para Tablas Papoose Boards Tamaño Regular
CAT. NO. 50524

Información para Realizar Pedidos

Llame al 1-866-753-4823

(llamada sin costo en E.U.A. y Canadá)

natus

Natus Europe GmbH

Robert-Koch-Str. 1
82152 Planegg
Alemania

Tel: +49 (0)89 / 83942-0

Fax: +49 (0)89 / 83942-777

www.natus.com

© 2012 Natus Medical Incorporated. Todos los derechos reservados. Todos los nombres de productos que aparecen en este documento son marcas o marcas registradas propiedad, licenciadas, promovidas o distribuidas por Natus Medical Incorporated, sus subsidiarias o afiliadas.